

排卵日予測検査薬 一般用黄体形成ホルモンキット クリアブルー排卵日予測テスト

ご使用前に添付文書を
よく読んでお使いください。

この検査薬の効果は？

この検査薬は、尿中の黄体形成ホルモン(LH)を検出し、排卵の引き金となるLHの大量分泌(LHサージ)をとらえる検査薬です。LHサージがおこってから、約40時間以内に排卵がおこることが知られています。排卵を予測するための方法の一つとして基礎体温が知られていますが、基礎体温と併せて検査を行うと、より排卵日の予測の補助として有用です。

この検査薬を使う前に、確認すべきことは

してはいけないこと

本品は、避妊目的に設計されておらず、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、**避妊の目的で用いてはいけません**。(本品は、排卵日予測の補助を目的とした検査薬であり、避妊目的には使用できません。性能上確実に排卵日を特定できるわけではありません。避妊法(経口避妊薬の服用等)を行っている人は検査を行わないでください。)

相談すること

- 次の人は、使用前に医師に相談すること。
 - 不妊治療を受けている人
 - 通常の性交を継続的に行っても1年以上妊娠しない人
 - 生理(月経)周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人
- 検査期間中、陰性が続きLHサージが確認できない場合は、早期に医師又は薬剤師に相談すること。
- この説明書の記載内容で分かりにくいところがある場合は、医師又は薬剤師に相談すること。

この検査薬の使い方は

① **検査の開始日を決めます。**〈次回生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始します。〉


② **検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。**

(過去に検査してLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性が陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。)


③ **検査のしかた**

- アルミ袋より、テストスティックを取り出します。
- テストスティックの付属のキャップをはずし、**サンプラーを下に向け**、尿を5秒間かけるか、清浄な容器に採取した尿中にサンプラーを20秒間浸して下さい。このとき、プラスチック部分は尿に浸さないで下さい。**サンプラーを検体に浸した後は、サンプラーを上に向けしないで下さい。**

サンプラーに尿を5秒間かける
10秒以上かけないでください

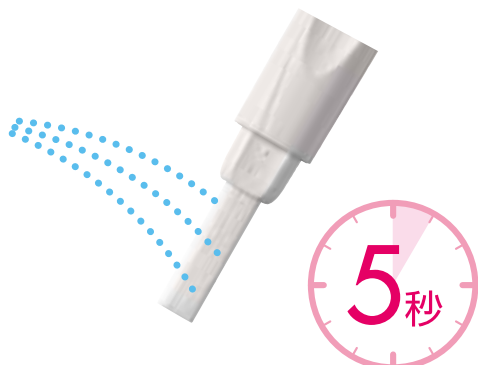

尿中にサンプラーを20秒間浸す
30秒以上浸さないでください


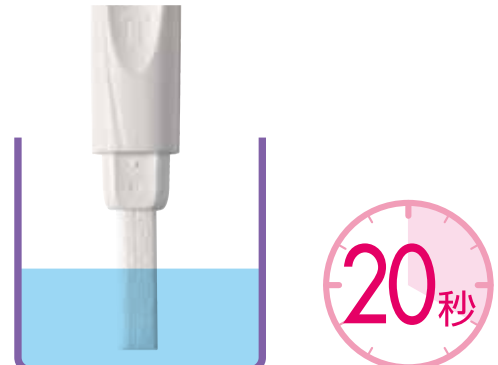



- サンプラーを下に向けたまま**キャップをかぶせ、判定窓が見えるようにして平らな場所に置く。
- 検査開始から3分後に判定窓を見る(10分以降の結果を判定に用いないでください)。

4 判定

検査開始から3分後、検査キットの判定部を以下のように判定してください。

初めて陽性になったときが、LHサージが検出されたということであり、間もなく排卵がおこるといえるのです。

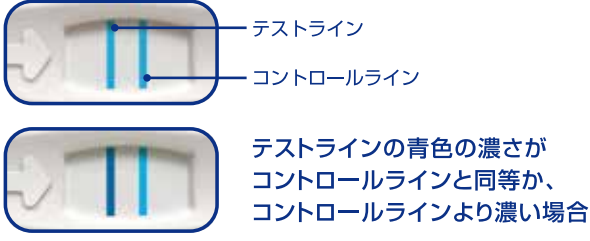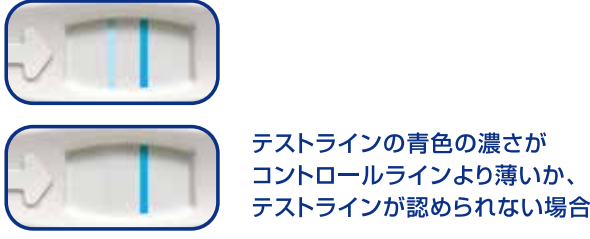判定方法		判定
陽性	 <p>テストライン コントロールライン</p> <p>テストラインの青色の濃さが コントロールラインと同等か、 コントロールラインより濃い場合</p>	LHサージが検出されました。間もなく排卵がおこると予測されます。 初めて陽性になった日かその翌日が最も妊娠しやすい時期(排卵日)です。
陰性	 <p>テストラインの青色の濃さが コントロールラインより薄いか、 テストラインが認められない場合</p>	LHサージが検出されませんでした。翌日以降もほぼ同じ時間帯に陽性になるまで検査を続けてください。
判定保留 (再検査)	 <p>コントロールラインが 認められない場合</p>	検査は無効です。別のテストスティックを用いて、再検査してください。この場合、サンプラーにしみこませた尿が少なかったこと等が考えられます。

この検査薬の使用に際し、気をつけなければならないことは

〈採尿に関する注意〉

- にごりのひどい尿や異物がまじった尿は、使用しないでください。
- 検査前4時間程度はできるだけ排尿しないでください。
- 検査前に、水分を過剰にとらないでください。
- 検査前に多量の発汗を伴う運動は避けてください。

〈検査手順に関する注意〉

- 採尿後は、速やかに検査を行ってください。尿を長く放置すると検査結果が変わってくる場合があります。
- 操作は、定められた手順に従って正しく行ってください。

〈判定に関する注意〉

① 検査初日から陽性になった場合

既に排卵された可能性があります。妊娠を望む場合は、できるだけ早く性交することで、妊娠の可能性が高まります。また、陰性になることが確認できるまで検査を続けてください。(確認できない場合は、③を見てください。)

② 検査期間中、陰性が続く場合

早期に医師又は薬剤師に相談してください。

通常、排卵期に、本品を使用すると陽性となりますが、女性の内分泌的背景、例えば不規則な生理(月経)周期、短期LHサージ(12時間以内)などの原因で、まれに陽性とならないことがあります。

③ 検査期間中、陽性が続く場合

早期に医師の診療を受けてください。

妊娠、分娩後、流産後、胎状奇胎・絨毛癌等の絨毛性疾患、人工妊娠中絶後、あるいは不妊治療のための薬剤投与、内分泌障害、閉経期などでは、排卵と無関係に、陽性が続く場合があります。

④ 検査をし、その都度陽性を確認した上で適切な時期に性交しても6周期以上妊娠しない場合

妊娠しにくい原因は排卵に関する問題だけではありません。できればパートナーと一緒に医師に相談してください。ただし30歳代後半以上の方、結婚後妊娠できない期間が長い方、早期の妊娠をご希望の方は早めに受診することをお勧めします。
※LH等のホルモンを含む不妊治療薬を投与している場合は、LHサージでなくても結果が陽性となることがあります。

この検査薬の形は

各部の名称（※テストラインとコントロールラインは尿をかけた後に現れます。）



この検査薬に含まれているのは

成分・分量【テストスティック1本中(抗体量として)】

抗 β -LHマウスモノクローナル抗体結合青色ラテックス粒子 …… 0.168~0.304 μ g

抗 α -LHマウスモノクローナル抗体 …… 0.672~0.768 μ g

保管及び取扱い上の注意

- 1 小児の手の届かない所に保管すること。
- 2 直射日光を避け、湿気の少ない所に保管すること(1~30℃)。
- 3 冷蔵庫内に保管しないこと。冷蔵庫への出し入れにより結露を生じ、検査結果に影響を与えるおそれがあります。
- 4 品質を保持するために、他の容器に入れ替えないこと。
- 5 使用直前に開封すること。
- 6 使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

Q & A

してはいけないことについて

Q. 避妊目的に使用してはいけないのでしょうか？

A. 本品は、妊娠の成立のために排卵日の予測の補助を行う検査薬であり、避妊目的に設計されていません。LHサージから通常排卵がおきると言われる40時間を大幅に超えて排卵がおきることがあること、精子は体内で3日以上生存する可能性があること、検査薬がLHサージをとらえる前に排卵がおきることがあること、検査結果が陰性であっても、体内では卵子が生存している可能性もあることから、確実に避妊できるものではありません。

検査の時期について

Q. 生理(月経)周期が不規則で、5、6日ずれることもあるのですが、検査はいつ始めるのが良いですか？

A. 生理(月経)周期が不規則な場合は、最近の2~3周期の中で1番短かった周期を目安にして次回生理(月経)開始予定日を決めてください。なお、生理(月経)周期が非常に不規則な場合は、重要な疾患が潜んでいる可能性も考えられるため、なるべく早く医師に相談してください。

Q. 計算に従って決めた検査開始日を今月は過ぎていましたが、いつからはじめたらいいですか？

A. 検査開始日を過ぎていた場合は、次回の周期にあらためて検査開始日を決めて検査してください。

Q. 検査を始めて2日が経過し、陰性が続いていましたが、3日目の検査を行うことを忘れてしまいました。4日目から再開の方がいいですか？

A. 4日目に検査をして陰性であったとしても、3日目に陽性だった可能性があり、排卵日を正確に予測できないおそれがあるため、次回の周期にあらためて検査開始日を決めて検査してください。

検査の間隔について

Q. 1日1回と2回のどちらがいいですか？

A. 本品はLHサージをとらえることで、排卵日を事前に予測するものです。LHサージは短時間に急激におこりますので、1日2回検査を行っていただくと、よりLHサージをとらえやすくなります。

判定について

Q. 飲酒、喫煙、かぜ薬等の服用は判定に影響しますか？

A. 影響しません。ただし、不妊治療のために投与されている薬剤の中には判定に影響するものもありますので、医師にご相談ください。

その他

Q. 6周期検査し、性交を持ったのに妊娠しないが…？

A. 妊娠しにくい原因は排卵に関する問題だけではありません。また、生理(月経)が順調だから問題がないという事でもありません。妊娠しにくい原因は様々ありますが、女性側の原因の多くは治療が可能です。自分一人で悩まず医師にご相談ください。この検査の結果や基礎体温を測定した結果があれば診断に役立つでしょう。できればパートナーと一緒に相談に行かれる事をおすすめします。


Q. 排卵日を知る手がかりである基礎体温と排卵日予測検査薬のちがいは？

A. 排卵がある周期の場合、基礎体温は低温相と高温相の二相があり、低温相から高温相に変化した頃に排卵があったことが推定できます。多くの場合、体温が上がってから排卵があったことが分かるので、基礎体温法では前もって予測することは難しいといわれています。一方、尿中の黄体形成ホルモン(LH)濃度の上昇が始まってから約40時間以内に排卵がおこる事が知られており、排卵日予測検査薬でLHの分泌量の変化を調べることで約1日前に排卵日の予測の補助を行うことができます。排卵日予測検査薬は補助的に排卵を事前に予測し、基礎体温は排卵を後で確認できますので、特に生理(月経)の不規則な方は基礎体温と排卵日予測検査薬を併せて使うことをおすすめします。

Q. 最も妊娠しやすい時期はいつですか？

A. 初めて陽性になった時から約40時間以内に排卵がおこる可能性が高いと予測され、その時期が最も妊娠しやすい時期といえます。

判定チャート

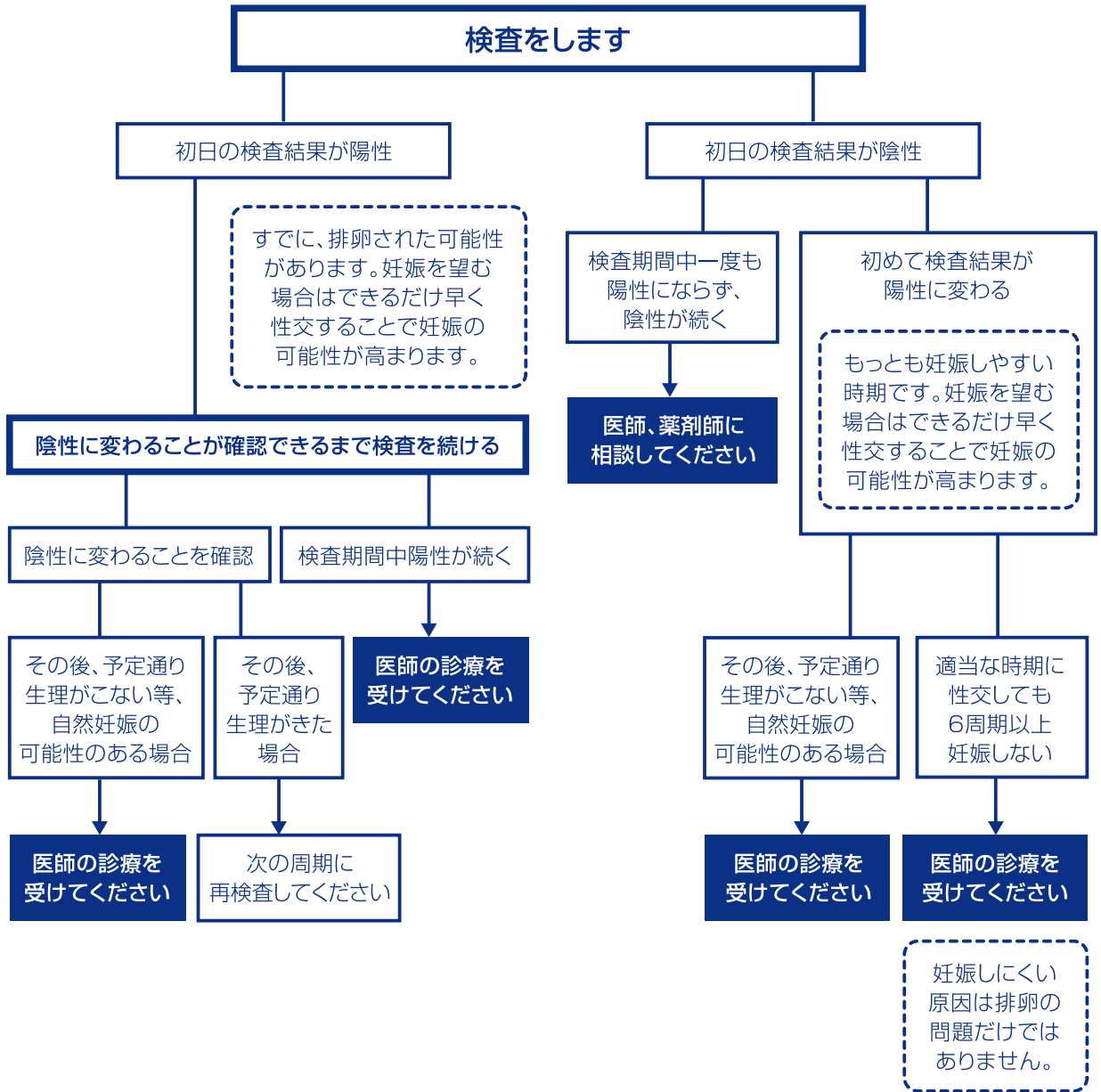

この検査薬についてのお問い合わせは

オムロン ヘルスケア お客様サポート

<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター 受付時間 9:00~19:00(祝日を除く月~金)

TEL 0120-30-6606(通話料無料) FAX 0120-10-1625(通信料無料)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。