

排卵日予測検査薬 チェックシート

このシートは、お客様がご使用の際にご自身で確認いただきたいことを示しています。

このシートで伺っている内容をご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

本製品については以下の内容について注意が必要です。
正しくご理解の上使用いただくようお願いいたします。
以下の内容について、正しく理解している場合は、
左の□にチェックをつけてください。

- 1. 本製品を避妊の目的で使用できないこと。
- 2. あなたが今、以下の場合に当てはまらないこと。又は、
当てはまる場合には医師に相談した上で使用していること。
 - ①不妊治療を受けている。
 - ②適切な時期に性交をもっても1年以上妊娠しない。
 - ③生理周期や月経に異常がある。
- 3. 検査期間中、陰性が続き LH サージ* が確認できない場合は、
早期に医師、薬剤師に相談すること。
(*LH サージとは、排卵の引き金になる黄体形成ホルモンの大量分泌のことです。
排卵日予測検査薬は、この LH サージをとらえることで、
排卵日を事前に予測します。)
- 4. 次の生理開始予定日の 17 日前から検査を開始すること。
- 5. 毎日ほぼ同じ時間帯に検査すること。
- 6. 検査及び判定のしかた